



環境が技術を生み出す
株式会社 **セーコン**

フェイスシールド A・フェイス


飛沫によるウイルス感染リスクの低減のためのフェイスシールドです。



斜面



正面


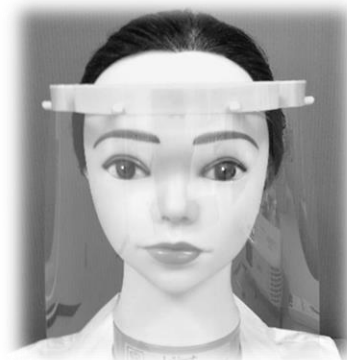


マネキン
株式会社レジーナ様 提供

- シールドシート：硬質ポリ塩化ビニル ヘッドバンド：ABS樹脂 バンド：シリコンゴム
- ヘッドバンドにフェイスシールドはフックにシートを嵌めるだけで簡単に取り外し交換できます。
- バンドはチューブの差し込み深さと長さを適宜切断して頭の大きさに対応します。
- バンドは繰り返し10回まで消毒して使用することが可能です。


【消毒方法】

1. ヘッドバンドの消毒は手袋を装着したままの状態ではアルコール又は0.05%次亜塩素酸に約10分間浸漬させてください。
2. 0.05%次亜塩素酸で消毒した場合、水またはアルコールで拭き、残留物を取り除いてください。
3. 清潔な吸収性タオルを用いて吸水するなど拭き乾燥させて下さい。
4. 手袋を外した後は、手指の衛生を行ってください。

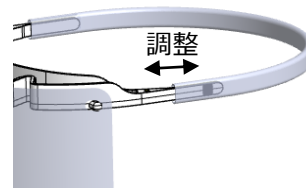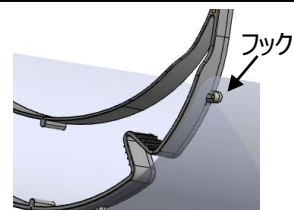

雑品扱い【無滅菌】

製品番号	1セットの構成	梱包単位
SK-0001A	ヘッドバンド1個+フェイスシールド10枚	10セット/箱
SK-0002S	ヘッドバンド1個+フェイスシールド1枚	10セット/箱

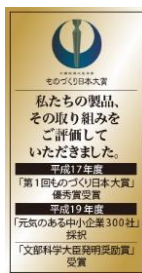

製造元 **株式会社セーコン**

TEL 0187-72-2830

〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺字八石90-1

お問合せ先 **株式会社秋田医科器械店**

TEL 018-839-3551

〒010-1423 秋田市仁井田字中谷地130-2